

## LISTA DE COMPROBACIÓN (ANTES DEL ENVÍO)

### 1. Tubo

- Nombre, apellidos y fecha de nacimiento del paciente** presentes en la etiqueta del tubo
- La muestra y el líquido **no deben exceder** la LÍNEA DE LLENADO
- El tubo debe estar **herméticamente cerrado**

### 2. Tubo de orina - Congelado

- Tubo de recolección con tapón transparente

### 3. Formulario de solicitud de prueba con pago

- El formulario de solicitud de prueba está completo **La prueba aparece indicada, el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo y la fecha de recolección** están registrados
- El formulario de evaluación de salud del paciente está completo
- Se incluye el pago o se abonó en línea en [www.gdx.net/prc](http://www.gdx.net/prc)

### 4. Devolver al laboratorio

- Asegurarse de devolver la muestra con el embalaje original y de situarlo en el interior del material de envío incluido.

## INSTRUCCIONES DE RECOLECCIÓN DE MUESTRAS MEDIANTE ORGANIX INSTRUCCIONES PARA LA RECOLECCIÓN DE ORINA DE PACIENTES




Pueden recopilarse las siguientes pruebas con estas instrucciones:

<b>Organix<sup>SM</sup> completo n.º 3301</b>	<b>Orina</b>
<b>Organix<sup>SM</sup> básico n.º 3304</b>	<b>Orina</b>
<b>Organix<sup>SM</sup> disbiosis n.º 3302</b>	<b>Orina</b>



**Puede que la prueba no se procese sin esta información:**


**Formulario de solicitud de prueba  
Proporcione:**

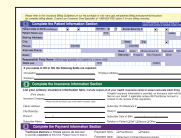

- Nombre y apellidos del paciente**
- Fecha de nacimiento**
- Sexo**
- Fecha de recolección**

**Todos los tubos**

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**Incluir en las etiquetas:**



- Nombre y apellidos del paciente**
- Fecha de nacimiento del paciente**

### Muestra

Orina

### Materiales adicionales

- Recipiente de recolección transparente (no incluido)
- Bolsa de riesgo biológico con material absorbente
- Formulario de evaluación de salud del paciente
- Sobre prepagado

### Materiales de recolección de orina



Tubo de recolección con tapón transparente



Pipeta

## ENVIAR LAS MUESTRAS AL LABORATORIO

Consultar las instrucciones de envío que se envían adjuntas con la caja del kit.



Llame al **800.522.4762** o visite nuestro sitio web en [www.gdx.net](http://www.gdx.net)

## RECOLECCIÓN

24 HORAS ANTES DE LA PRUEBA:

-24

NOCHE PREVIA A LA PRUEBA:



- Ingesta de alimentos habitual**, pero evitar consumir en exceso cualquier comida o las dietas extremas.
- El consumo de líquido** debe limitarse a ocho (8) vasos de 8 oz durante un plazo de 24 horas.
- Congelar** el bloque de hielo adjunto durante un mínimo de 8 horas antes del envío.

**IMPORTANTE:** Para garantizar la precisión de los resultados, se **DEBE** facilitar la información solicitada.

**1** Etiquetar todos los tubos con el nombre, los apellidos y la fecha de nacimiento del paciente.

**2** Escribir el nombre, los apellidos, la fecha de nacimiento, el sexo y la fecha de la recolección en el formulario de solicitud de prueba.

**3** Si el paciente se despertara a orinar durante la noche (a falta de seis horas para levantarse) debe recolectar esa orina en un recipiente de recolección esterilizado o en un recipiente limpio y desechable y refrigerarlo. Al despertarse, el paciente debe recolectar la primera orina de la mañana en el mismo recipiente. Rellenar el recipiente y depositar la orina adicional en el inodoro.




**4** Utilizar la pipeta para transferir la orina del recipiente de recolección en el tubo de recolección con tapón transparente hasta llegar a la marca de 12 ml. **No sobrepasar la marca.**



**5** Volver a cerrar el tubo herméticamente. Desechar la orina restante.

**6** Colocar el tubo y el bloque de hielo en la bolsa de riesgo biológico y congelar durante un mínimo de 2 horas.

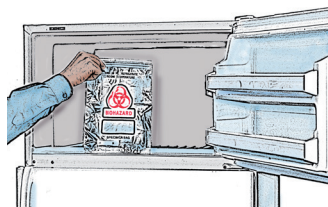

## RECOLECCIÓN

MAÑANA DE LA RECOLECCIÓN:



- Evitar** el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavar abundantemente con jabón y agua. En caso de ingesta, contactar con el centro de toxicología de inmediato.
- Las mujeres** no deben recolectar muestras de orina durante la menstruación.

Para consultar la información completa, visitar: [www.gdx.net/tests/prep](http://www.gdx.net/tests/prep)